



Premier® Enamel Pro® Varnish

Vernis au fluorure de sodium 5 % • Formule ACP

FR

Instructions de soins post-traitement pour les patients

Votre dentiste ou hygiéniste a appliqué une couche thérapeutique de Enamel Pro® Varnish sur la surface de plusieurs de vos dents. Ce produit apparaît comme une pellicule fine sur la surface de la dent. Le résidu de pellicule est temporaire et ne doit pas être touché afin de garantir les meilleurs résultats thérapeutiques aux surfaces traitées.

Pour obtenir le meilleur de l'application du vernis, nous recommandons ce qui suit :

- Enamel Pro® Varnish doit rester sur les dents.
- Ne pas brosser les dents ni passer la soie dentaire.
- Manger des aliments mous et éviter les boissons chaudes et les produits contenant de l'alcool au cours de la période de traitement.
- L'utilisation de comprimés de fluorure supplémentaires sur ordonnance doit être interrompue pendant deux à trois jours suivant le traitement (à moins d'indications contraires de votre dentiste ou médecin).

Brosser et passer la soie dentaire de manière méticuleuse sur vos dents éliminera toutes les traces restantes de Enamel Pro® Varnish une fois le traitement terminé. Après le brossage, vos dents retrouveront leur apparence et brillance normales.