



Premier® Enamel Pro® Varnish

5%フッ化ナトリウムワニス・ACP 製剤

JP

治療後の患者ケア説明書

歯科医/歯科衛生士が、あなたの数本の歯の表面にEnamel Pro® Varnishの治療コーティングを塗布しました。歯の表面に薄い白いフィルムが見えるかもしれませんが、フィルムが残留しているのは一時的な状態ですので、治療領域に最大の治療効果をもたらすために、そのままにしておいてください。

ワニス塗布から最大限の効果を得るために、以下を推奨します。

- Enamel Pro® Varnishは歯に塗布したままにしてください。
- 歯磨きやフロスの使用は避けてください。
- 治療期間中は柔らかい食べ物を食べ、熱い飲み物やアルコールを含む製品は避けてください。
- 処方されたフッ化物サプリメントの使用は、治療後2~3日間は中断してください（歯科医または医師から別途指示がない限り）。

治療終了後、十分な歯磨きとフロスの使用によって、Enamel Pro® Varnishの残留物が取り除かれます。歯磨きの後、あなたの歯は通常の外観と明るさを取り戻します。