



Premier® Enamel Pro® Varnish

5% 플루오르화 나트륨 바니시 • ACP 처방서

KO

환자용 치료후 관리 안내

치과 의사/위생사가 귀하의 치면 여러 곳에 Enamel Pro® Varnish 치료용 코팅제를 도포했습니다. 귀하의 치면에 얇은 흰색 필름이 코팅된 것이 보일 것입니다. 필름 잔류물은 일시적으로 존재하며 시술 부위에 최고의 치료 결과를 제공하도록 그대로 두어야 합니다.

바니시 도포 후 최대의 효과를 얻기 위해서, 다음 사항을 준수하시길 바랍니다.

- Enamel Pro® Varnish는 치아에 남아 있어야 합니다.
- 양치질 또는 치실질을 하지 마십시오.
- 치료 기간 중에는 부드러운 음식을 먹고 뜨거운 음료와 알코올을 함유한 제품을 피하십시오.
- 처방 받은 플루오르 보조제의 사용은 치료 후 2-3일 동안 중단하여야 합니다(담당 치과 의사 또는 의사가 달리 지시하지 않은 한 중단하십시오).

치료 완료 후 양치질과 치실질을 철저하게 하시면 Enamel Pro® Varnish의 모든 잔여 흔적들이 제거될 것입니다. 칫솔질을 하고 난 다음에는, 치아의 정상적인 외형과 광택이 되돌아올 것입니다.